



1. Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees alle instructies voordat u dit product gebruikt. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

De waarschuwingen geven belangrijke veiligheidsinstructies aan. Wanneer deze instructies niet in acht worden genomen, kan dat persoonlijk letsel of schade aan het product veroorzaken. De volgende symbolen en signaalwoorden geven de ernst van de waarschuwingen aan.

WAARSCHUWING Kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.

WAARSCHUWING Kan leiden tot lichte verwondingen.

LET OP Kan tot materiele schade leiden (niet gerelateerd aan persoonlijk letsel).

Informatie Nuttige of belangrijke informatie die geen verband houdt met de veiligheid.

Bij gebruik van elektrische apparaten moet u zich altijd aan de basisveiligheidsregels houden, zeker als er kinderen bij aanwezig zijn. Bewaar het product buiten bereik van kinderen.

WAARSCHUWING

Om vuur, elektrische schokken of ernstige brandwonden te voorkomen:

- Laat de borstkolf nooit onbeveiligd achter met de stekker in het stopcontact.
- Gebruik een elektrisch apparaat niet als het snorer of de stekker beschadigd is, het niet goed werkt, geveult of beschadigd is of in water is gevallen. In geval van beschadiging, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de Medela KlantenService.
- Gebruik geen elektrische producten die zijn blootgesteld aan water of andere vloeistoffen.
- Niet gebruiken in bad of onder de douche.
- Niet in water of een andere vloeistof plaatsen of erin laten vallen.
- Geen water over de borstkolf laten stromen.
- Rook een elektrisch product niet aan als het is blootgesteld aan water of een andere vloeistof. Schakel indien mogelijk het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de fabrikant.
- Stel de borstkolf of de accu niet bloot aan hoge temperaturen.

WAARSCHUWING

Om gezondheidsrisico's te voorkomen en het risico op ernstig letsel te beperken:

- De product is bedoeld voor gebruik door kinderen. Bij gebruik door meer dan één persoon kunnen er gezondheidsrisico's ontstaan en vervalt de garantie.
- Gebruik de borstkolf niet tijdens het rusten van een voertuig.
- Kolven kan de bevelling opwekken. Begin pas met koken na de bevelling.
- Als u zwanger wordt in de periode dat u borstvoeding geeft of alakt, raadpleeg dan een professionele zorgverlener voordat u ermee doorgaat.
- Als u levert bent met borstvoeding, heuratie C of het live virus humaan immunodeficiëntievirus) wordt het risico dat het virus via moedermelk op de baby wordt overgedragen niet laag en/of geïnfecteerd door de koken.
- Maak alle onderdelen die in aanraking komen met de borst en moedermelk na elk gebruik schoon.
- De slang vormt een risico op wurging als ermees geploegd wordt. Daarnaast kunnen peuters kleine onderdelen inslikken.

WAARSCHUWING

Om vuur of brandwonden te voorkomen:

- Let erop dat de spanning van de transformator overeenkomt met die van de voedingsspanning. Raadpleeg **hoofdstuk 16** voor technische specificaties.
- Trek onmiddellijk de stekker van een elektrisch apparaat uit het stopcontact na het opladen.

WAARSCHUWING

Om gezondheidsrisico's te voorkomen en het risico op letsel te beperken:

- Inspecteer de afzonderlijke onderdelen vóór elk gebruik visueel op barsten, schade, scheuring, verkleuring of slijtage. Als schade aan het apparaat vaststaat, gebruik het niet meer tot die onderdelen vervangen zijn.
- De product kan niet worden onderhouden of gerepareerd. Repareer het apparaat niet zelf. Blijf geen wijzigingen aan het apparaat aan.
- Gebruik nooit een beschadigd apparaat. Vervang beschadigde of versleten onderdelen. Gebruik de borstkolf alleen voor het beoogde doel, zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik de borstkolf niet tijdens het slapen of als u zeer slaperig bent.
- Stook het gebruik en vervang de slang als deze beschadigd is.
- Moedermelk niet verwarmen in de magnetron en niet koken. Bij het gebruik van een magnetron kunnen het spoutje in de melk ontstaan die ernstige brandwonden aan de mond van de baby kunnen veroorzaken. (Bij verwarming in de magnetron of koken kan ook de samenstelling van de moedermelk veranderen.)
- Reinig en desinfecteer alle onderdelen die in contact komen met uw borst en moedermelk vóór het eerste gebruik.

LET OP

Go voorzichtig om met flessen en onderdelen:

- Plaatse en onderdelen kunnen beschadigd raken bij verkeerde hantering (bijvoorbeeld als ze vallen of worden omgeworpen).
- Gebruik de moedermelk niet als de fles of een onderdeel lekken van beschadiging veront.

2. Beoogd doel

De Freestyle™ Mini is bedoeld voor borstvoedende moeders om moedermelk af te kolven en op te vangen. De Freestyle™ Mini is bedoeld voor gebruik thuisgebruik.

3. Productomschrijving

3.1 Beschrijving van de Freestyle™ Mini borstkolf

De Freestyle™ Mini is een elektrische borstkolf voor persoonlijk gebruik, die is voorzien van de 2-Phase Expression™ technologie en gebruikt kan worden voor enkelzijdig en dubbelzijdig afkolven. De bedrijfsduur van de Freestyle™ Mini borstkolf bedraagt 300 uur. De verwachte bedrijfsduur van de wasbare onderdelen (borstschild, connector en membraan, fles en deksel) is zes maanden.

3.2 Het volledige borstkolfsysteem

PersonalFit Flex borstschild, 24 mm
1x voor enkele elektrische borstkolf
2x voor dubbele elektrische borstkolf

PersonalFit Flex connector
1x voor enkele elektrische borstkolf
2x voor dubbele elektrische borstkolf

PersonalFit Flex borstschild, 21 mm
1x voor dubbele elektrische borstkolf

*Andere borstschildmaten, waaronder 27 mm en 30 mm, en inzetstukken van 15 mm, 18 mm en 21 mm, zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

Fles
1x voor enkele elektrische borstkolf
2x voor dubbele elektrische borstkolf

1x motorunit

1x enkele slang voor enkele elektrische borstkolf

1x dubbele slang voor dubbele elektrische borstkolf

1x keykoord

Deksel
1x voor enkele elektrische borstkolf
2x voor dubbele elektrische borstkolf

1x USB-C-kabel meegeleverd (stroomadapter niet meegeleverd)

Korte uiteinden van de slang (aansluiten op één of twee connectors)

Uiteinde van de slang (aangesloten op één connector)

Lang uiteinde van de slang (aan te sluiten op motorunit)

Uiteinde van de slang (aan te sluiten op motorunit)

Lang uiteinde van de slang (aan te sluiten op motorunit)

1x dubbele slang voor dubbele elektrische borstkolf

Korte uiteinden van de slang (aansluiten op één of twee connectors)

Slanghouder




De inhoud kan afwijken van de afbeelding.

4. Aan de slag

4.1 Eerste stappen

Go ter voorbereiding op het afkolven vóór het eerste gebruik als volgt te werk:

1. Verwijder de clip van het keykoord. Haal het keykoord van de clip door het gat van de borstkolf en duw de clip in de lus. Maak de clip opnieuw vast aan het keykoord.

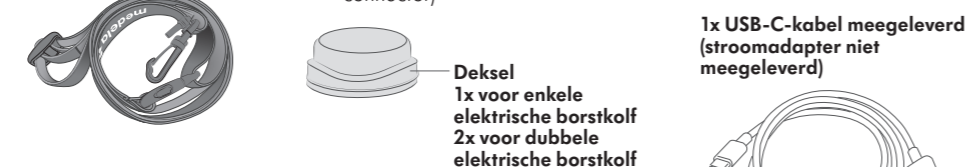

2. Laad de accu van uw Freestyle™ Mini borstkolf drie uur op. Raadpleeg **hoofdstuk 4.3**.

3. Haal alle onderdelen die in aanraking komen met de borst of moedermelk vóór het reinigen uit elkaar. Raadpleeg **hoofdstuk 5**.

4. Reinigen en desinfecteren de onderdelen - Raadpleeg **hoofdstuk 5.3 en 5.4**.

4.2 De borstkolf van stroom voorzien



Laad de accu van de borstkolf vóór het eerste gebruik drie uur op met de stroomadapter (niet meegeleverd).

→ Wanneer de accu volledig is opgeladen, ziet u drie balkjes op de display. Raadpleeg **hoofdstuk 8.2** voor meer informatie over de accuweergave op de display.

4.3 De accu opladen

WAARSCHUWING

• Gebruik alleen de USB-C-kabel die bij de borstkolf is geleverd. Een niet geschikt(e) stroombron of USB-C-kabel kan leiden tot brandgevaar, een elektrische schok of het niet goed functioneren van apparatuur door overspanning. De garantie geldt alleen als de Medela USB-C-kabel gebruikt om uw borstkolf op te laden.

• De borstkolf kan tijdens het opladen niet worden gebruikt.

• Laad de borstkolf nooit op met een beschadigd USB-nettoeren.

• Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat als u rook of brand opmerkt uit de pomp of de stroomadapter.

• De borstkolf kan niet worden gerepareerd of hersteld wanneer deze is aangesloten op de lader.

Laad de accu drie uur op voordat u de borstkolf voor het eerst gebruikt. Raadpleeg **hoofdstuk 8.2** voor meer informatie over de accuweergave op de display.

WAARSCHUWING

Stel de borstkolf, of de accu niet bloot aan hoge temperaturen.

Informatie

• De pomp gaat niet aan tijdens het opladen.

• De toegestane omgevingstemperatuur voor het opladen van de accu is 5 °C - 40 °C.

WAARSCHUWING

• Laad het product volledig op voordat u het voor het eerst gebruikt. Laad de accu niet langdurig op. Lithium-ion-accu's mogen alleen vervangen worden door erkende serviceproviders. Als u het vastzede model accu vervangt, kan dat explosiegevaar opleveren. Voor afgedekte accu's of volgens de plaatselijke wetten en voorschriften.

• Als het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, raakt de accu leeg. Om hem opnieuw te kunnen activeren, moet hij opnieuw worden aangesloten. Nadat u de stroom heeft aangesloten, wacht u tien minuten totdat het scherm oplicht, ten teken dat het apparaat is geactiveerd. Laad het product vervolgens op totdat het volledig is opgeladen. Als het na langer dan een half uur nog niet geactiveerd is, neem dan contact op met de KlantenService.

- Sluit de USB-C-kabel aan op de motorunit.
- Sluit de USB-C-kabel aan op de stroomadapter (niet meegeleverd).
- Stek de stroomadapter (niet meegeleverd) in een stopcontact.

5. Reinigen

Het is belangrijk om vóór het eerste gebruik van de borstkolf het volgende te doen: Haal alle onderdelen uit elkaar en maak ze schoon volgens de reinigingsinstructies van de borstkolf.

Wat heeft u nodig?

- Mild afwasmiddel
- Schone, zachte borstel
- Schone wastiel
- Water van drinkkwaliteit
- Schone pan voor het koken van water

Onderdelen om te wassen of te desinfecteren:

- Borstschild(en)
- Moedermelkflesjes
- Deksel(s)
- Connector(en)
- Membraan/membranen

WAARSCHUWING

Haal alle onderdelen die in aanraking komen met moedermelk direct na het gebruik uit elkaar en was ze af. Zo kan u melkresten verwijderen en de groei van bacteriën tegengaan.

- Was uw handen grondig met water en zeep.
- Gebruik voor het reinigen alleen leidingwater van drinkkwaliteit of fieswater.
- Leg onderdelen van de koff niet rechtstreeks in de gootsteen om ze af te spoelen of af te wassen. Doe dit in een schone wastel die u uitsluitend gebruikt voor onderdelen voor u baby.
- Gebruik geen theedoek om onderdelen droog te wrijven of deppen.
- Gebruik geen ontmetingsmiddelen om te reinigen.

LET OP

Medela Freestyle™ Mini borstkolf heeft een gesloten systeem zodat er geen melk in de slang kan komen als de borstkolf volgens de instructies wordt gebruikt. **Reinig of spoel de slang in geen geval.**

- Controleer de slang voor gebruik. Als u condensate, moedermelk en schimmel in de slang control, stop dan het gebruik en vervang de slang.
- Gebruik de borstkolf niet als de slang nat is, anders beschadigt u de borstkolf.

LET OP

Let op het volgende:

- Fis op dat u tijdens het reinigen geen onderdelen van de opvangpomp beschadigt.
- Bewaar de droge opvangpomp tot het volgende gebruik in een schone zak/verpakking.
- Berg onderdelen niet op wanneer ze nat of vochtig zijn, aangezien ze schimmel kan ontstaan.
- Als u na het koken witte resten op de opvangpomp ziet, heeft het gebruikte water mogelijk een hoog mineralgehalte. Verwijder deze resten door de onderdelen met een schone doek af te wassen en laat de onderdelen aan de lucht drogen.
- Om onzuinig van mineralen die zich na verloop van tijd ophopen, te voorkomen, wordt het aanbevolen om voor het koken van onderdelen gedestilleerd water te gebruiken.

5.1 Reinigingsoverzicht

Afwassen is niet hetzelfde als desinfecteren. Deze activiteiten moeten afzonderlijk van elkaar worden uitgevoerd ter bescherming van uzelf, uw baby en de prestaties van uw borstkolf.

Wassen – de oppervlakken van de onderdelen reinigen door melkresten en andere mogelijke verontreinigende stoffen fysiek te verwijderen.

Desinfecteren – Om het aantal ziektekiemen dat op de oppervlakken van de gewassen onderdelen aanwezig kan zijn, efficiënt te verminderen.

	Borstschilden	Connectors en membranen	Flessen en deksels
Wanneer reinigen?			

Vóór het eerste gebruik

Haal de onderdelen uit elkaar zoals beschreven in **hoofdstuk 5.2**
Was de onderdelen af zoals beschreven in **hoofdstuk 5.3**
Desinfecteer de onderdelen zoals beschreven in **hoofdstuk 5.4**

Na elk gebruik

Haal de onderdelen uit elkaar zoals beschreven in **hoofdstuk 5.2**
Was de onderdelen af zoals beschreven in **hoofdstuk 5.3**

Eenmaal per dag na gebruik

Haal de onderdelen uit elkaar zoals beschreven in **hoofdstuk 5.2**
Was de onderdelen af zoals beschreven in **hoofdstuk 5.3**
Desinfecteer de onderdelen zoals beschreven in **hoofdstuk 5.4**

	Slang	Motorunit
Wanneer reinigen?		

Wanneer nodig

Reinig of spoel de slang in geen geval.

Afvegen met een schone, vochtige doek. Raadpleeg **hoofdstuk 5.5**.

WAARSCHUWING

• Als u na het koken witte resten op de opvangpomp ziet, heeft het gebruikte water mogelijk een hoog mineralgehalte. Verwijder deze resten door de onderdelen met een schone doek af te wassen en laat de onderdelen aan de lucht drogen.

5.2 Uit elkaar halen

Vóór het eerste gebruik

Verwijder de beschermkap* van het borstschild en gooi deze weg.

Na elk gebruik

Haal de afkolset als volgt uit elkaar tot losse onderdelen (borstschild, connector en fles). Verwijder het borstschild van de connector.

Open de achterste dop van de connector door beide flappen samen te knippen en de dop omhoog te draaien.

Verwijder het membraan van de connectorbehuizing. Scheid de melkflesjes van de deksels.

WAARSCHUWING

• Spuit of giet geen vloeistof direct op de borstkolf.

• Gebruik wanneer u de display van de motorunit reinigt uitsluitend een zachte, vochtige doek met een mild afwasmiddel. Andere reinigingsmiddelen of schurende doeken kunnen de prestaties van de display negatief beïnvloeden.

• Dompel de motorunit niet onder in water en laat er geen water overheen lopen.

LET OP

1. Schakel de borstkolf uit.

2. Haal de stekker van de borstkolf uit het stopcontact.


3. Neem de motorunit af met een schone doek die is bevochtigd met water van drinkkwaliteit.

4. Veeg de motorunit droog met een schone, droge doek.

5.3 Afwassen

Afwassen is belangrijk voor de hygiëne en dient voor het reinigen van de oppervlakken van de onderdelen door vervuilingen te verwijderen. Was de onderdelen met de hand of in een afwasmachine.

Afspoelen en met de hand afwassen (vóór het eerste en vervolgens na elk gebruik)

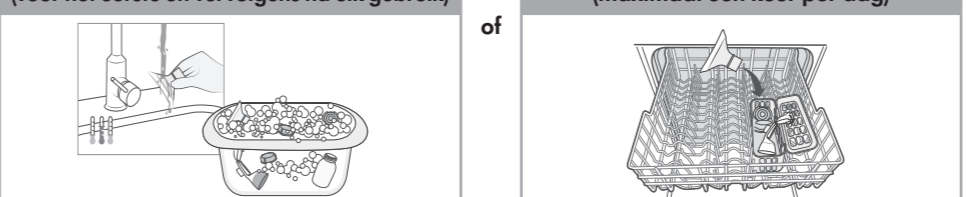

Leg de onderdelen niet rechtstreeks in de gootsteen om ze af te spoelen en af te wassen. Doe dit in een speciale wastel die u uitsluitend gebruikt voor onderdelen voor uw baby.

1. Spoel de losse onderdelen, behalve de slang, met koud, schoon water van drinkkwaliteit (circa 20 °C).

2. Reinig deze onderdelen in ruim warm zeepwater (circa 30 °C). Gebruik een gangbaar afwasmiddel en een schone zachte borstel.

3. Spoel de onderdelen gedurende 10 tot 15 seconden met koud, schoon water van drinkkwaliteit (circa 20 °C).

4. Laat de onderdelen na het afwassen volledig drogen.

WAARSCHUWING

1. Laat de onderdelen op een schone, ongebruikte theedoek of keukenpapier aan de lucht drogen.

Voor enkel elektrisch



Voor dubbel elektrisch



5.4 Desinfectie

Desinfecteren is belangrijk voor de hygiëne en dient voor het doden van levende organismen, zoals bacteriën of virussen. Kook de onderdelen op het fornuis of gebruik Quick Clean magnetronzakken.

Desinfecteren in een pan met water (vóór het eerste gebruik en eenmaal per dag na gebruik)

Desinfecteren in de magnetron (eenmaal per dag na gebruik)

1. Zorg dat de losse, afgewassen onderdelen, behalve de slang, onder voldoende water staan en laat minimaal 10 minuten koken.

Zorg ervoor dat de onderdelen niet direct in contact komen met de bodem van de pan.

2. Laat drogen na het desinfecteren.

1. Gebruik Quick Clean™ magnetronzakken volgens de voorschriften op de zakken.

2. Laat drogen na het desinfecteren.

* Raadpleeg de plaatselijke website/winkels voor informatie over de beschikbaarheid in uw land.

Drogen

1. Laat de onderdelen op een schone, ongebruikte theedoek of keukenpapier aan de lucht drogen.

2. Bewaar de schone, droge onderdelen in een schone bewaarzak of in een schone omgeving.

Bewaar de onderdelen niet in een luchtachtige verpakking/zak als ze nog vochtig zijn. Het is belangrijk dat al het achtergebleven vocht opdroogt.

Voor enkel elektrisch



Voor dubbel elektrisch

Benodigde onderdelen:

- Motorunit

5.5 De motorunit reinigen

Wat heeft u nodig?

- Water van drinkkwaliteit
- Mild afwasmiddel
- Een schone theedoek of keukenpapier

WAARSCHUWING

• Spuit of giet geen vloeistof direct op de borstkolf.

• Gebruik wanneer u de display van de motorunit reinigt uitsluitend een zachte, vochtige doek met een mild afwasmiddel. Andere reinigingsmiddelen of schurende doeken kunnen de prestaties van de display negatief beïnvloeden.

• Dompel de motorunit niet onder in water en laat er geen water overheen lopen.

LET OP

1. Schakel de borstkolf uit.

2. Haal de stekker van de borstkolf uit het stopcontact.

3. Neem de motorunit af met een schone doek die is bevochtigd met water van drinkkwaliteit.

4. Veeg de motorunit droog met een schone, droge doek.

6. De maten van het borstschild

6.1 De juiste maat borstschild kiezen

Zorg ervoor dat u de juiste maat borstschild gebruikt. Dit is essentieel om effectief te kunnen kolven.



1. Meet voor de juiste maat de diameter van uw tepel.

2. Kies een borstschild dat iets groter is dan uw tepel.

Go voor meer informatie over het bepalen van de maat borstschild naar www.medela.nl / www.medela.be.

7. De borstkolf in elkaar zetten

Zet de borstkolf alleen in elkaar met schone en droge onderdelen. Raadpleeg **hoofdstuk 5** voor het reinigen.

7.1 De afkolset in elkaar zetten

Zet de borstkolf alleen in elkaar met schone en droge onderdelen. Raadpleeg **hoofdstuk 5** voor het reinigen.

Benodigde onderdelen:

- Slang
- Motorunit
- Borstschilden
- Moedermelkflesjes
- Deksels
- Connectors
- Membranen

WAARSCHUWING

Om besmetting van de melk te voorkomen:

- Was uw handen grondig met water en zeep voordat u de motorunit, onderdelen van de afkolset en de borsten aanraakt.
- Droog uw handen af met een schone, ongebruikte handdoek of met een papieren handdoek voor eenmalig gebruik.
- Rook de binnenkant van flesjes en deksels niet aan.

Om ervoor te zorgen dat de borstkolf naar behoren en veilig werkt:

- Controleer voor gebruik de onderdelen van de afkolset op slijtage en beschadiging. Vervang ze indien nodig.
- Controleer vóór gebruik altijd of alle onderdelen schoon zijn. Bij vervuiling reinigen zoals beschreven in **hoofdstuk 5**.
- Gebruik alleen originele onderdelen van Medela.

LET OP

Om schade aan de borstkolf te voorkomen, moeten vóór het gebruik alle onderdelen helemaal droog zijn.

Plaats het (donkergele) membraan voorzichtig met het lipje in de uitsparing in de connector.

→ Zorg ervoor dat het membraan een correcte afdichting vormt rondom de rand van de connector.

Sluit het connectordeksel totdat u hoort dat het vastklikt.

Schroef de connector op de fles.

Druk het borstschild voorzichtig in de behuizing van de connector.


→ Kies een borstschild in de voor u geschikte maat. Voor de juiste maat raadpleegt u **hoofdstuk 6**

7.3 Voorbereiding voor dubbel afkolven

- i Informatie**
- Dubbel kolven bespaart tijd en verhoogt de voedingswaarde van de melk.
- Steek de korte slanguiteinden in beide connectoren.
 - Correct in elkaar gezet systeem (voor dubbelzijdig afkolven).
 - Plaats de borstschilden op de borsten met de tepel in het midden van de schacht.
 - Houd de borstschilden en de connectors met uw duim en wijsvinger op de borsten. Ondersteun de borsten met de palm van uw hand. Begin met afkolven, zoals beschreven in **hoofdstuk 8.3**.

7.4 De borstkolf dragen

Met het keykoord kan de borstkolf schuin over uw lichaam of om de taille gedragen worden.

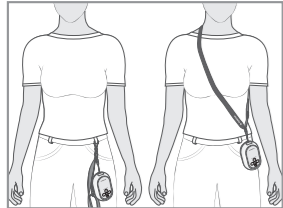

8. De borstkolf bedienen

8.1 Termen en aanduidingen

2-Phase Expression™	Na onderzoek heeft Medela geconcludeerd dat baby's in 2 fasen zuigen: de stimulatiefase en de afkolffase. Dit onderzoek vormt de basis voor de technologie waarmee alle borstkolven van Medela zijn uitgerust.
Stimulatiefase	Snelle zuig-/kolffmodus om de melkstroom te stimuleren.
Afkolffase	Tragere zuig-/afkolffmodus voor een aangename, efficiënte melkverwijdering nadat de melkstroom op gang is gekomen.
Maximaal Comfortabel Vacuüm	Hoogste vacuüminstelling waarbij het afkolven nog steeds comfortabel is. Dit verschilt per persoon.
Toeschieten	De reflex waardoor de melk vanuit de borst begint te stromen.

8.2 Bedienings- en displayelementen

Bedienings-elementen

- Knop Toeschieten
- Knop vacuüm verhogen
- Knop vacuüm verlagen
- Knop aan/uit/pauze

Displayelementen

- Weergave van vacuümniveau
- Stimulatiefase-indicator
- Tijdweergave
- Afkolffase-indicator
- Accu-niveau-indicator

Tips voor de gebruiker:
De bedienings- en displayelementen zijn niet altijd zichtbaar. Wanneer de borstkolf is ingeschakeld, worden de actieve elementen verlicht.

Display met stroom- en accustatus

	Op de accudisplay ziet u de status van de accu en het laadniveau. → Wanneer er drie balkjes worden weergegeven, is de accu vol.
	Naarmate de accu leegraakt, worden er minder balkjes weergegeven. → Twee balkjes: er is nog circa 70 % van de capaciteit over. → Eén balkje: er is nog circa 35 % van de capaciteit over.
	→ Wanneer het laatste balkje van de borstkolf knippert, is de accu bijna leeg.

8.3 Moedermelk afkolven

⚠ WAARSCHUWING

- Probeer niet te kolven op een vacuümniveau dat te hoog en oncomfortabel (pijnlijk) is. Door de pijn, in combinatie met mogelijk trauma aan de borst en tepel, kan de melkproductie afnemen.
- Raadpleeg uw zorgverlener of lactatiekundige als u slechts een minimale hoeveelheid of geen melk kunt afkolven of als het afkolven pijnlijk is.

LET OP

Zorg ervoor dat de slang niet geknikt of ingedrukt wordt tijdens het afkolven.

- Als u dit nog niet heeft gedaan, sluit u de afkolset nadat u deze in elkaar heeft gezet aan op de slangpoort aan de voorkant van de borstkolf.
- Zorg ervoor dat de afkolset aangesloten is en juist is gepositioneerd.
- Houd de knop aan/uit/pauze aan de voorkant ingedrukt totdat de lampjes op het scherm aangaan. Laat vervolgens de knop los.
 - De borstkolf start in de stimulatiefase.
- Pas het vacuüm aan met de knoppen Vacuüm verhogen en Vacuüm verlagen om in de stimulatiefase een comfortabel niveau te vinden.

- Druk zodra de melk begint te stromen op de knop Toeschieten om over te schakelen naar de afkolffase.
 - De borstkolf gaat verder met de afkolffase.
 - Als u niet binnen één minuten op de knop Toeschieten drukt, gaat de borstkolf automatisch naar de afkolffase.
- Pas het vacuüm aan met de knoppen Vacuüm verhogen en Vacuüm verlagen om uw maximale comfortabele vacuüm te vinden in de afkolffase.

Uw maximaal comfortabele vacuüm vinden

Het maximaal comfortabele vacuüm is het hoogste vacuümniveau waarbij het afkolven nog comfortabel voelt.

- Wanneer u kolft in de afkolffase, verhoog u het vacuüm met de knop totdat het afkolven enigszins onaangenaam aanvoelt (niet pijnlijk).
- Verlaag vervolgens het vacuüm totdat met één druk op de knop .

i Informatie

- De pomp is niet bedoeld om tegeerd of terwyl u slaapt te gebruiken. Je kunt echter wel een beetje naar voren of naar achteren leunen tijdens het afkolven.
- Het maximale volume/de maximale capaciteit van de opvangcup is 150 ml. Wanneer deze limiet is overschreden, giet dan de melk over in een fles voordat u verdergaat met afkolven.

- Druk nadat de afkolffessie is voltooid op de knop Aan/Uit/Pauze om het afkolven te stoppen.
 - Als de borstkolf 30 minuten niet is gebruikt, stopt deze automatisch. De borstkolf schakelt automatisch uit na 10 minuten pauze.
- Druk lang op de knop aan/uit/pauze aan de voorkant om de borstkolf uit te schakelen.

Pauze

De borstkolf kan zowel in de stimulatie- als de afkolffase worden gepauzeerd. U kunt dan een andere houding aannemen, de flesjes opnieuw positioneren of even iets anders doen.

- Als u wilt pauzeren, drukt u kort op de knop aan/uit/pauze terwyl de borstkolf in werking is.
- Als u het afkolven wilt hervatten, drukt u opnieuw kort op de knop aan/uit/pauze .

Als u een nieuwe afkolssessie wilt starten, schakelt u de borstkolf uit. Druk lang op de knop aan/uit/pauze om opnieuw te starten.

i Informatie

- Deze borstkolf schakelt automatisch uit na 30 minuten gebruik. De borstkolf schakelt automatisch uit na 10 minuten pauze.
- Om verder te gaan met afkolven, moet u een nieuwe sessie starten.
- Als u langer dan twee minuten wilt pauzeren, wordt het aanbevolen om opnieuw te beginnen met de stimulatiefase.

9. Moedermelk bewaren en ontdooien

9.1 Algemene richtlijnen voor het bewaren

Raadpleeg www.medela.com voor aanbevelingen over het bewaren en ontdooien van moedermelk.

10. Onderhoud en verzorging

10.1 Onderhoud van de accu

Dit apparaat bevat accu's die niet kunnen worden vervangen. Als de accu het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet het apparaat op de juiste manier worden afgevoerd.

LET OP

Wanneer het apparaat op het voedingsnet is aangesloten, kan het niet worden gebruikt. Laat de accu opladen voordat u het apparaat gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING

- Gebruik de USB-C-oplaadkabel die bij dit product is geleverd. Sluit de USB-C-oplaadkabel niet aan op de motor voor gebruik, om schade aan de motor te voorkomen.
- Gebruik een adapter met een ingangsspanning van AC100-240V en een uitgangsspanning van DC5V en 2,5A.
- Niet demanteren, erop kloppen, knijpen of in het vuur gooien. Sommige onderdelen van Lithium-ion-accu's zijn brandbaar en schadelijk. Ze kunnen leidel, brand, scherven of een explosie veroorzaken.
- Niet in een omgeving met hoge temperaturen plaatsen.
- Stop met het gebruik indien er ernstige zwelling optreedt.
- Versnijd de accu niet zelf, om oververhitting van de accu, brand of persoonlijk letsel te voorkomen.
- Vervang de accu, open, smelt of prik de accu of het accupack niet met metaal.
- Laad de accu niet langdurig op. Voordat u de accu weggooit, moet u deze uit het apparaat verwijderen.
- Lithium-ion-accu's mogen uitgesloten door ons bedrijf of door erkende dienstverleners worden vervangen. Er bestaat een risico op oververhitting van de accu's van een verkeerd model. Wanneer de accu wordt verwijderd, moet het apparaat uitgeschakeld zijn. Voer ouch de accu's en oplaadsets volgens de nationale milieuvorschriften.

LET OP

Wees u bewust van het risico dat metalen voorwerpen of vloeistoffen kortsluiting kunnen veroorzaken in de USB-C-aansluiting of de accu van de borstkolf.

i Informatie

Om de accu te sparen:

- Berg de borstkolf op een koele plek op.
- Laad de accu op voordat deze helemaal leeg is. Dit kan de levensduur van de accu ten goede.
- Laad de accu volledig op voordat u de borstkolf opbergt. Raadpleeg **hoofdstuk 8.2** voor informatie over de oplaadstatus van de accu.
- Als de borstkolf op een warme plek is opgeborgen, werkt deze mogelijk niet direct op de accu. Laat de borstkolf een uur afkoelen om de normale accu-temperatuur te hervatten. U kunt de borstkolf wel alvast gebruiken met de stroomadapter.

Reizen naar het buitenland

i Informatie

Gebruik tijdens het reizen de meegeleverde USB-C-kabel en koppel deze aan de USB-voedingsbron die geschikt is voor uw huidige locatie. Deze borstkolf heeft een Lithium-ion-accu. In het land dat u bezoekt is het mogelijk niet toegestaan om dergelijke accu's in een vliegtuig bij u te hebben. Ga na of er in het land dat u bezoekt beperkingen gelden met betrekking tot reizen met Lithium-ion-accu's. Houd er rekening mee dat de prestaties van (productnaam) kunnen worden beïnvloed door de externe omgeving, gezien de onzekerheid en instabiliteit van de reisomgeving.

10.2 Langdurige opslag

Bij langdurige opslag dient u dekolf op een droge en koele plaats te bewaren.

Vergeet het volgende niet wanneer u de borstkolf voor een langere periode wilt opbergen:

- Reinig de afkolset en de flesjes (raadpleeg **hoofdstuk 5**)
- Reinig de motorunit (raadpleeg **hoofdstuk 5.5**)
- Zorg ervoor dat de accu is opgeladen (zie hieronder)

Het is het beste om de accu volledig op te laden voordat u de borstkolf voor langere tijd opbergt. Raadpleeg **hoofdstuk 8.2** voor informatie over de oplaadstatus van de accu.

⚠ WAARSCHUWING

- Als het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, wordt de accu leeg. Om hem opnieuw te kunnen activeren, moet hij opnieuw worden aangesloten. Nadat u de stroom heeft aangesloten, wacht u tien minuten totdat het scherm oplicht, als teken dat het apparaat is geactiveerd.

11. Problemen oplossen

Raadpleeg de kolom 'Probleem' in de probleemoplossingstabel bij een afwijkende werking van de borstkolf en volg de instructies in de kolom 'Oplossing'.

Probleemoplossingstabel

Probleem	Oplossing
De display wordt niet verlicht nadat u op de knop aan/uit/pauze heeft gedrukt	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de voeding waarop de borstkolf is aangesloten naar behoren functioneert. Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met de klantenservice van Medela.
De timer wordt niet geactiveerd nadat u op de knop aan/uit/pauze heeft gedrukt	<ul style="list-style-type: none"> Neem contact op met de klantenservice van Medela.
De borstkolf genereert geen vacuüm (de motor werkt niet) nadat u op de knop aan/uit/pauze heeft gedrukt	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de borstkolf is ingeschakeld. Neem contact op met de klantenservice van Medela.
De borstkolf genereert alleen een continu vacuüm in plaats van zuigcycli	<ul style="list-style-type: none"> Neem contact op met de klantenservice van Medela.
De borstkolf stopt met werken of kan niet worden ingeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> De borstkolf werkt niet wegens oververhitting van de accu. Laat de motorunit afkoelen en schakel de borstkolf vervolgens opnieuw in.
Er is weinig of geen zuigkracht	<ul style="list-style-type: none"> Zorg ervoor dat alle onderdelen van de afkolset schoon en droog zijn en de aansluitingen goed vastzitten. Zorg dat de membranen correct in de connectordoppen zijn geplaatst en dat de connectordoppen stevig zijn gesloten. Zorg dat de borstschilden stevig in de connectordoppen zijn gedrukt. Zorg er tijdens het afkolven voor dat de borstschilden rondom de borst luchtdicht afsluiten. Zorg er tijdens enkelzijdig afkolven voor dat het uiteinde van de ongebruikte slang goed in het Y-stuk is geplaatst. Neem contact op met de klantenservice van Medela als het vacuüm niet verbetert.
De borstkolf reageert niet zoals verwacht	<ul style="list-style-type: none"> Neem contact op met de klantenservice van Medela.
De buitenkant van de borstkolf is nat geworden	<ul style="list-style-type: none"> Haal de stekker van de borstkolf uit het stopcontact en schakel de borstkolf af.
De borstkolf is ondergedompeld in water	<ul style="list-style-type: none"> Haal de stekker van de borstkolf uit het stopcontact en schakel de borstkolf af. Neem contact op met de klantenservice van Medela.

Neem contact op met de klantenservice van Medela als u het probleem met de borstkolf niet heeft kunnen oplossen of als u nog vragen heeft. Ga voor contactgegevens naar www.medela.com. Kies uw land onder 'Contact'.

12. Garantie

Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Als u dit apparaat afgevoerd of ermee knoeit, vervalt de garantie.

Ga voor meer informatie over de internationale garantie naar www.medela.com/ewarranty.

13. Afvalverwijdering

De borstkolf wegwerpen

Haal aan het einde van de levensduur alle onderdelen van uw borstkolf uit elkaar.

Borstschilden, buitenste schillen en slangen zijn gemaakt van kunststof. **Membranen** zijn gemaakt van silicone. U kunt gescheiden inzameling toepassen volgens de lokale inzamel- en recyclingsystemen.

Motorunit, voedingsadapter (niet meegeleverd) en USB-C-kabel (elektronische apparatuur) kunnen gevaarlijke stoffen bevatten en mogen niet samen met ongesorteerd gemeentelijk afval worden afgevoerd. De ingebouwde accu mag niet worden verwijderd om deze weg te werpen. Als de accu lekt, moet de borstkolf worden afgevoerd. Elektrische en elektronische producten (EPE) worden aangegeven met het volgende symbool:



In de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland moet de fabrikant of zijn leverancier afgedankte EPE-apparatuur terugnemen; andere landen kunnen soortgelijke inzamelings- en recyclingsystemen hebben. Dit apparaat bevat accu's die niet kunnen worden vervangen en niet mogen worden verwijderd voor afvoer.

LET OP

Voer het afgedankte apparaat of volgens de lokale voorschriften. Vraag in de winkel naar inzamelpunten voor afgedankte apparaten of neem hiervoor contact op met uw gemeente. Het afzonderlijk inkopen en recyclen van afgedankte apparaten helpt bij het behoud van natuurlijke bronnen en zorgt ervoor dat de apparatuur wordt gerecycled op een manier die niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid en het milieu.

14. Betekenis van de symbolen

In de volgende tabellen worden de symbolen op de onderdelen en de verpakking van het product uitgelegd.

	Geeft de fabrikant aan.		Geeft het catalogusnummer aan.
	Geeft het serienummer aan.		Geeft het batch-/lotnummer aan.
	Geeft de productiedatum aan.		Algemeen veiligheidswaarschuwingssymbool, verwijst naar informatie betreffende de veiligheid.
	Uit de buurt van regen houden. In een droge omgeving bewaren.		Plaats het product niet in het zonlicht.
	De verpakking bevat producten die in contact mogen komen met levensmiddelen conform verordening (EG) nr. 1925/2004.		Geeft aan dat de inhoud van de transportverpakking kwetsbaar is en dat de verpakking moet worden gehanteerd met zorg.
	Geeft aan dat de verpakking gerecycled kan worden.		Geeft aan van welk materiaal een artikel is gemaakt.
	Voer elektrische/elektronische apparaten niet samen met ongesorteerd gemeentelijk afval af (voer het apparaat af in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving).		Dit geeft aan dat de gebruiksaanwijzing vóór gebruik geraadpleegd dient te worden.
	Definieert een relatief vochtigheidsbereik.		Definieert een temperatuurbereik.
	Definieert een luchtdruk.		Geeft de mate van bescherming tegen binnendringen van vreemde voorwerpen en vocht aan.
	Duidt gelijkstroom aan.		

Landspecifiek

	Geeft aan dat het product voldoet aan de EU-vereisten voor huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten.		De Regulatory Compliance-markering geeft conformiteit aan met Australische EMC- en radiotransmissievereisten.
	Geeft aan dat het apparaat in het Verenigd Koninkrijk op conformiteit is beoordeeld.		Geeft aan dat het product in de verpakking veldtoet is om in rechtstreeks contact met voedsel te komen.

15. Internationale voorschriften

15.1 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

De Freestyle Freestyle™ Mini borstkolf voldoet aan alle vereisten van de relevante standaarden en regelgeving met betrekking tot elektromagnetische emissie en storingsimmunititeit.

⚠ WAARSCHUWING

De Freestyle™ Mini borstkolf mag niet direct naast of geïnstalleerd op andere apparatuur worden gebruikt. Is het toch noodzakelijk apparatuur naast of op elkaar te plaatsen, controleer dan de Freestyle™ Mini borstkolf in de betreffende configuratie normaal functioneert. Draadloze communicatieapparatuur zoals draadloze apparaten van een thuisnetwerk, mobiele telefoons, draadloze telefoons en bijbehorende basistations en walkietalkies kunnen de werking van de elektrische borstkolf beïnvloeden en dienen op ten minste 30 cm afstand te worden gehouden.

16. Technische specificaties

Overzicht van belangrijke technische specificaties

Nominale luchtdruk: 850 hPa - 1060 hPa; -60 tot -290 mmHg, ± 20 mmHg (-80 to -386 hPa, ±26 hPa) 45 tot 111 cpm, ±5 cpm (Dubbelzijdig afkolven)		Bedrijfstemperatuurbereik 5 °C tot 40 °C	
-65 tot -255 mmHg, ± 20 mmHg (-86 tot -340 hPa, ±26 hPa) 45 tot 111 cpm, ± 5 cpm (Enkelzijdig afkolven)		Vochtigheidsbereik (20 % tot 80 % relatieve vochtigheid)	
		Omgevingsdruk (850 hPa tot 1060 hPa)	
Invoer 5 V 2,5 A 12,5 W			
Elektriciteitsverbruik in niet-belaste toestand		Minder dan 0,1 W	
Motorunit			
Accu-capaciteit en -type		2200mAh Lithium-ion, maat 18650	
Maat		113x68x42 mm, ±1 mm	
Gewicht		205 g ±10g	
		+55 °C -20 °C	Temperatuurbereik transport en opslag -20 °C tot 55 °C
		80 %	Vochtigheidsbereik transport en opslag (20 % tot 80 % relatieve vochtigheid)

Materialen die in contact komen met de huid of de melk

- Borstschild: Polypropyleen, thermoplastisch elastomeer
- Connector: Polypropyleen, silicone
- Fles: Polypropyleen
- Deksel: Polypropyleen
- Membraan: Silicone